


T-EZ Pro[®] Indicador de limpieza

REF TEZ/15

Instrucciones de uso :


1. Retirar el T-EZ Pro del embalaje inmediatamente antes de su uso
2. Ajustar el T-EZ Pro sobre la bandeja. Se puede utilizar el T-EZ Pro en carga vacía o completa.
3. El T-EZ Pro se puede colocar en uno o cada nivel del rack en función del nivel de seguridad requerido. Referirse al ejemplo en el dibujo debajo.

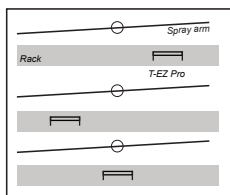

Rack multinivel

4. Seleccione el programa de limpieza validado e inicie el ciclo.
5. Una vez completado el ciclo de limpieza, evaluar el rendimiento de limpieza de la máquina y del ciclo.

- a. Una superficie metálica limpia = éxito de la eficiencia de la limpieza.
- b. Si la superficie del metal no está limpia, el ciclo no tuvo éxito. Compare con la ayuda de evaluación para resolver el problema.

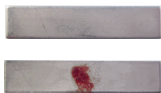

6. Anotar el resultado de la evaluación visual en el informe de control del lote.
7. El T-EZ Pro se puede eliminar con residuos domésticos.

Nota: ISO 15883 y AAMI ST79 recomiendan el monitoreo diario de la eficacia de la limpieza.

-  18-25°C
-  35-70%
-  18 meses a partir de la fecha de fabricación